

RingConn

עברית


1 הורדת אפליקציית RingConn:

חפש את "RingConn" בחנות האפליקציות של iPhone או Android, או סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהירשם.



2 הפעלת הטבעת בפעם הראשונה:

הנה את הטבעת בתוך תחנת הטעינה. נורית LED מהבהבת בצבע כחול מציינת שהטבעת הופעלה ומוכנה להתחברות לטלפון.

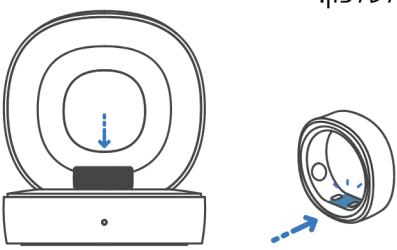

4 לבישה נכונה של הטבעת:

התאם את הטבעת כך שתישב בנוחות על האצבע והמשך לענוד אותה בצורה נכונה.


המלצות:
- אם הטבעת זזה - ניתן לכוון מחדש את המיקום על האצבע.
- לפני שימוש ראשון מומלץ לטעון למשך 60 דקות או לוודא שרמת הסוללה לפחות 80%.



3 חיבור הטבעת לאפליקציה:

פתח את אפליקציית RingConn < עבור למקטע Me < בחר Add Device ובצע את שלבי החיבור.

כדי להבטיח התחברות תקינה:
-ודא שה-Bluetooth פעיל בטלפון.
-השאר את הטבעת במרחק של פחות ממטר אחד מהטלפון.

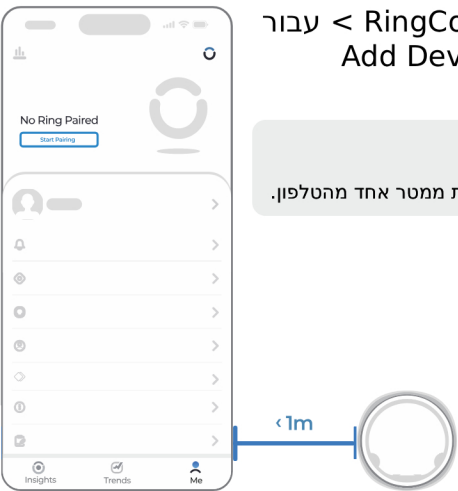


6 מצב נורית חיווי (LED):

הטבעת:

מהבהב כחול: הטבעת פעילה ונמצאת במצב התחברות
כחול קבוע ל-3 שניות: יציאה ממצב טיסה

תחנת הטעינה:

לבן מהבהב: תחנת הטעינה נטענת
לבן קבוע: תחנת טעינה טעונה 100%-20%
כתום קבוע: תחנת טעינה טעונה 20%-0%
כחול מהבהב: הטבעת נטענת
כחול קבוע: הטבעת טעונה במלואה
כתום מהבהב: תקלה בטעינה

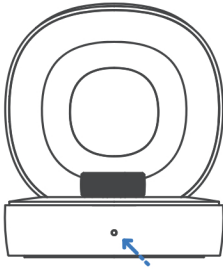

5 צפייה בנתונים:

סנכרון וצפייה בנתוני בריאות, סוללה ושינה מתבצעים דרך אפליקציית RingConn.

מומלץ לענוד את הטבעת לאורך זמן ולבצע סנכרון נתונים יום-יום לשיפור דיוק המדדים. שימו לב למצב הסוללה והטעינו כשיש צורך.

